

四点杖取扱説明書

(らくらく4点杖)

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。

本製品を正しくお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。
内容をご理解いただき、記載の危険・注意事項をお守りください。
この「取扱説明書」はいつでもご覧いただけるよう、大切に保管してください。

長さの調節方法

- ① 固定用リングを時計まわりに回し、緩めます。
 - ② 長さ調節ボタンを指で押しながら下シャフトを伸縮させて、長さを調節してください。
 - ③ 長さ調節ボタンが“カチッ”と音がしたことを確かめてください。
 - ④ 固定用リングを反時計まわりに回して締め付けてください。
- ⚠ “長さ調節ボタン”および“振れ止めネジ”はご本人または介助者の方が、確実に固定されているか必ずお確かめください。固定されていないと事故やケガの原因になり、危険です。

※左手で、ご使用いただく場合

出荷時は、右手でご使用いただけるように出荷をさせていただいています。

長さ調節方法と同じ方法で②の長さ調節をする際に4点脚部分を180度回転させていただくと左手でご使用いただけるよう長さ調節ボタンが反対穴から出てくる構造になっています。

①③④は、長さ調節方法と同様です。



安全に使用して頂くためのご注意

- 手元(グリップ)とパイプの接続部が緩んでいませんか？
 - パイプにひび割れ、変形はありませんか？
 - ステッキの足キャップに切れ目や異常なのび等がありませんか？
- ※これらについては、ご使用前に必ず点検してください。

商品特徴

- アルミ合金製で軽くて丈夫。
- 身体に合わせて長さを調節できます。
- 足キャップは安全な滑り止めゴム付。
- らくらく4点杖は、椅子から立ち上がるのにとっても便利です。
(利き手で上のグリップを握り、もう片側の手で真ん中のグリップを握る)

杖の保管方法

- 直射日光を避け、風通しがよく湿気の無い所に保管してください。
- 杖の上に物を乗せたり、物を引っ掛けたりしたまま保管しないでください。



0401-CS1152 使用例

株式会社インターリンクス

〒462-0063

名古屋市中区丸新町 390 番地 リンクスビル

TEL:052-901-8181 FAX:052-901-8185